

VOCO**Klint****Fluoridfreie Paste zur Plaquentfernung
und Politur von Zahnoberflächen**

Klint befreit die Zähne gründlich und schonend, ohne Schädigung des Zahnschmelzes, von Verunreinigungen und Plaque. Verfärbte, belegte Füllungen erhalten wieder ihre Originalfarbe.

Klint hat einen angenehmen Pfefferminzgeschmack.

Die Anwendung von **Klint** empfiehlt sich vor Kariesprophylaxe-Maßnahmen, der Behandlung von Hypersensibilität von Zahnhälsen u. a..

Anwendungshinweise:

Die Paste wird auf die handelsüblichen Poliernäpfe (Gummipolierer) aufgetragen. Um eine Erwärmung zu vermeiden, sollte der Poliernapf immer genügend Paste enthalten. Speichel ist gegebenenfalls abzusaugen, damit keine zu starke Verdünnung der Paste auftritt.

Nach der Anwendung die gereinigten Flächen abspülen und mit Luft trocknen.

Anschließend können dann Behandlungsmaßnahmen wie

- Kariesprophylaxe durch Auftragen von Fluoridlacken
- Behandlung von überempfindlichen Zähnen
- Befestigung von kieferorthopädischen Regulierungssystemen auf intakten Zähnen
- Bleichbehandlungen

oder ähnliches durchgeführt werden.

Hinweis:

Enthält Farbstoff E 102. Bei Unverträglichkeit nicht anwenden.

Handelsformen:

Tube 60 g	Art.-Nr. 2336
9 g Tube im Fluoridin N5 Set	Art.-Nr. 1260
9 g Tube im Perfect Bleach Set	Art.-Nr. 1660

VOCO

Postfach 767
27457 Cuxhaven
Germany

Tel. (04721) 719-0
Fax (04721) 719-109
e-mail: marketing@voco.de
www.voco.de